



Lightness[®]
莱特妮丝

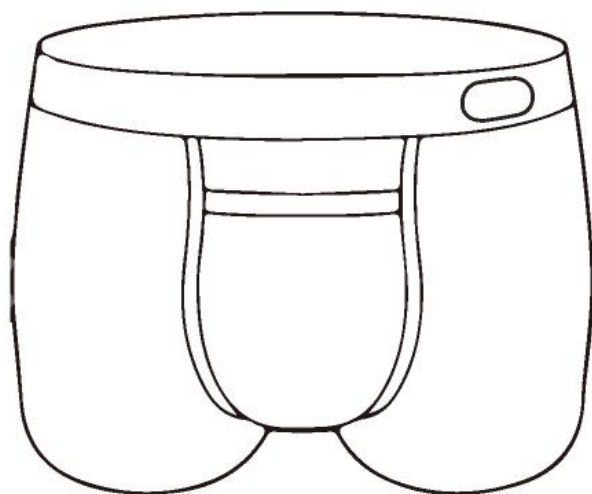


AI智能前列腺健康管理旋磁内裤

使用说明书

模块充电

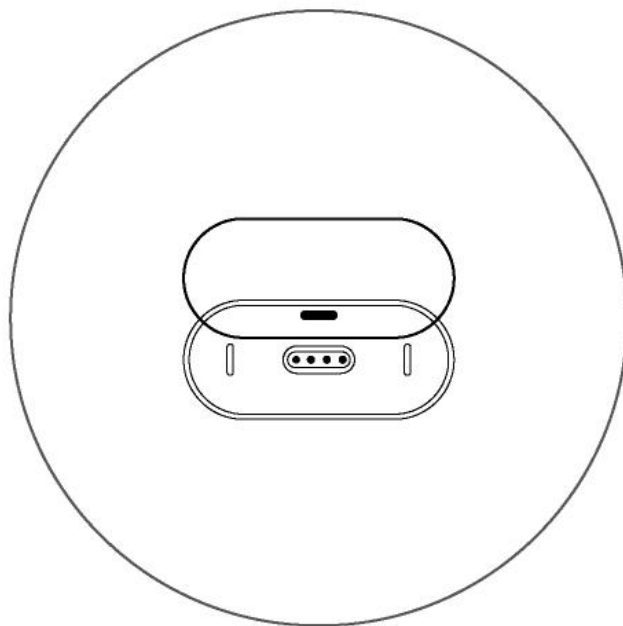


1 模块放到充电座上

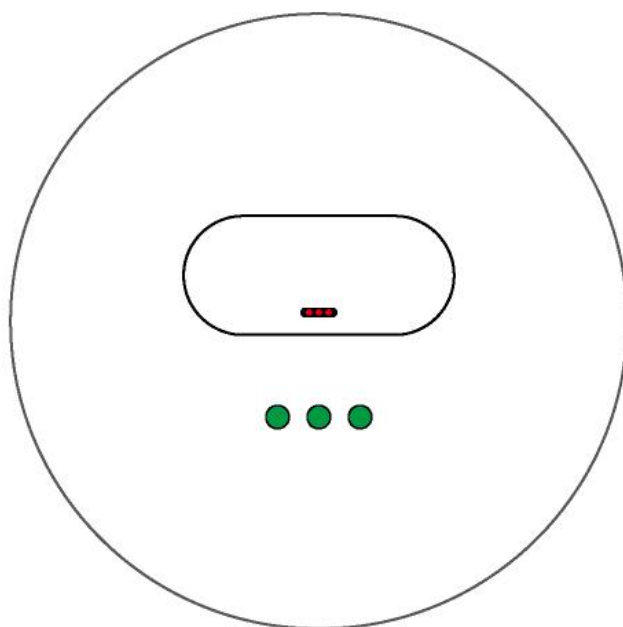


2 充电状态：红灯闪烁
充满状态：绿灯常亮

产品安装

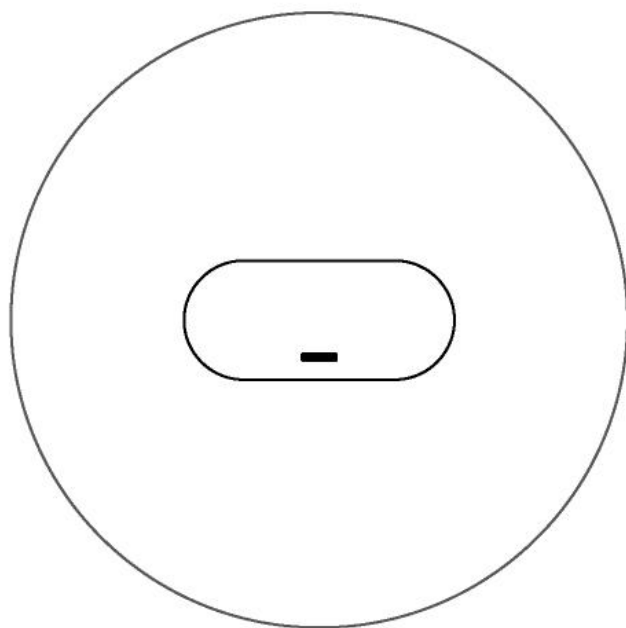


1 首次使用，拿到模块

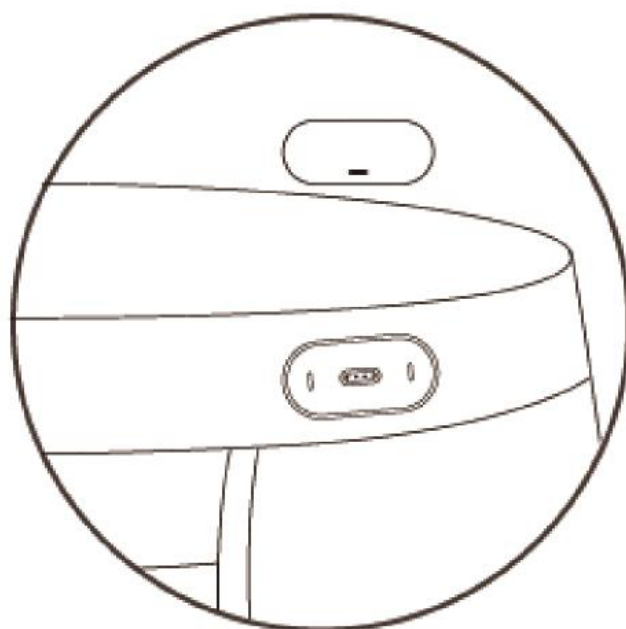


2 模块磁吸到内裤上，保持接触点良好

产品安装

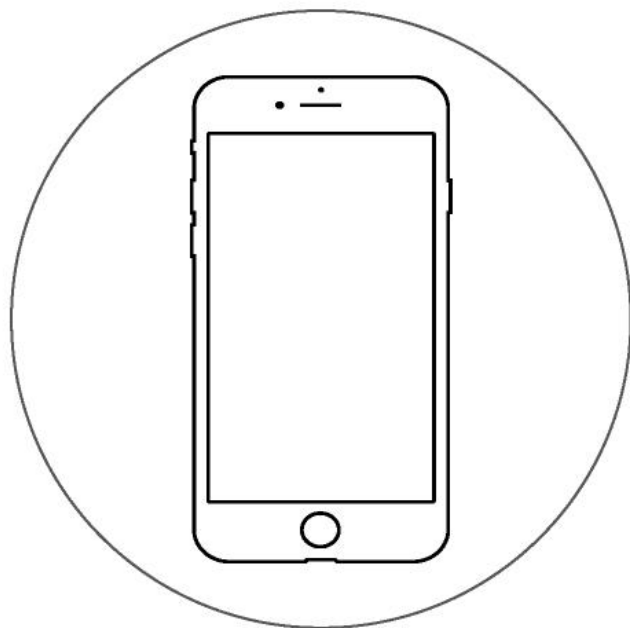

3 搜索“莱特妮丝旋磁”APP，连接APP

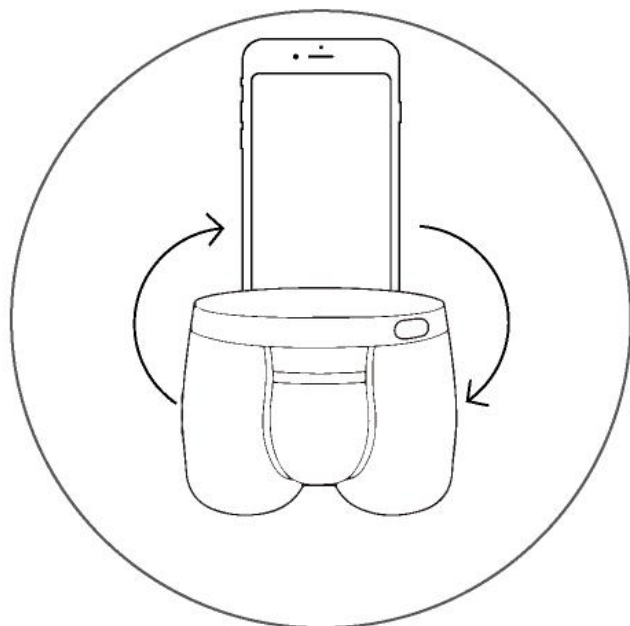

4 配合内裤，使用APP

APP 操作

1 搜索” 莱特妮丝旋磁” APP 2 登录或注册



3 搜索设备



4 连接设备



5 点击按钮



6 选择功能




APP 操作

7 定时设置




8 点击左侧按钮

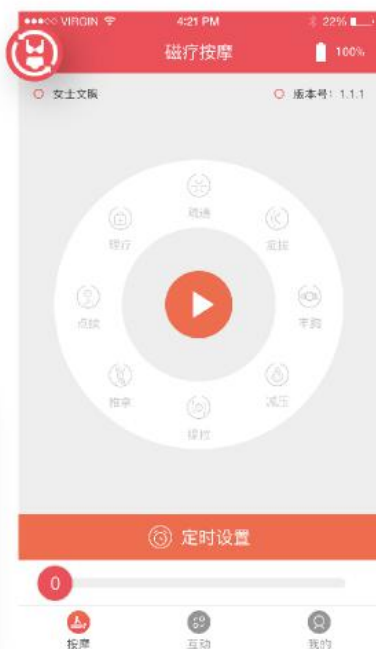


9 切换设备



10 切换：互动界面

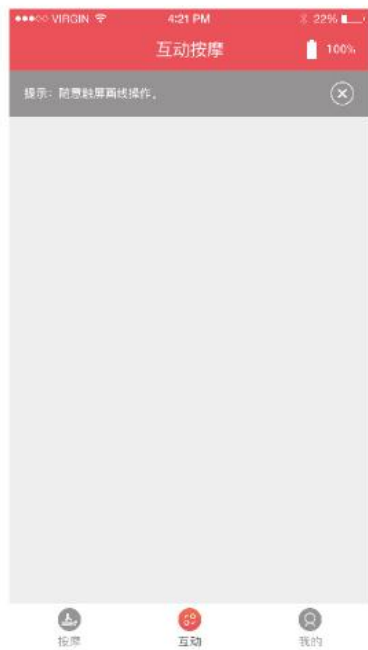

11 随意手绘线

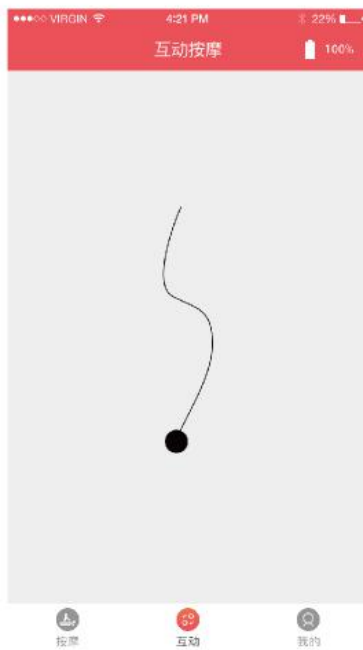

12 切换：我的界面



固件升级

1 点击按钮



2 点击确定



3 点击下载



4 点击升级



5 等待升级



6 点击确定并重启



注意:

当模块与 APP 连接状态并对模块固件升级时, 不得退出 APP 务必等待固件升级成功, 固件升级成功后需清退重启 APP, 再, 进行连接模块使用。

功能参数

| | |
|-------|----------------|
| 电 池: | 聚合物锂电池 |
| 电池容量: | 100mAh |
| 执行标准: | GB31241-2014 |
| 输 入: | 5V 0.5A-1A |
| 输 出: | 2.5-3V 0-100mA |
| 待机时间: | 15天 |
| 同步方式: | 蓝牙4.0 |

功能特点

旋磁
理疗

穴位
按摩

APP
同步

防水
性强

轻揉
手洗

设计要点

APP
操控

触点
充电

安静
理疗


磁吸
设计

轻薄
透气


使用注意

- 1 旋磁理疗作用：促进血液循环，起到疏通效果
- 2按摩力度分7个档位，旋磁理疗会产生磁场，档位大小不影响疏通效果，可根据个人使用习惯，选择档位。
- 3 清洗前请将智能模块取下，勿将模块和内裤一起浸泡或清洗。
- 4水温不宜超过30℃，不宜用热水长时间浸泡内裤。
- 5 请用中性温和洗涤剂。
- 6为了更好的保养智能内裤，请手洗，不得用力拉扯和搓洗裆部位置，洗涤好后轻轻挤压掉多余水份，不得用力拧干，需自然晾干，不能暴晒。
- 7 清洗后需完全晾晒干才能使用。
- 8 主机模块不得在高温、潮湿等环境中存放、使用。
- 9 禁止将主机模块置于火中，不得挤压、撞击、拆卸、穿刺主机模块。
- 10 建议使用时长：每次按摩建议使用15~20分钟左右即可按摩时保持放松状态。
- 11 以下人群不可使用此产品：心脏病患者、体内安装有支架、起搏器、精神病患者、癌症患者、严重三高、脑血栓等。

功能卖点

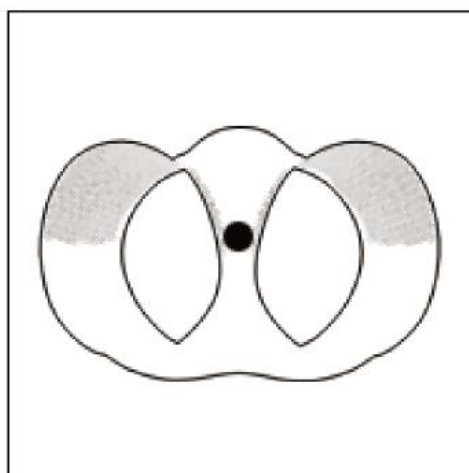


1 智能穴位按摩

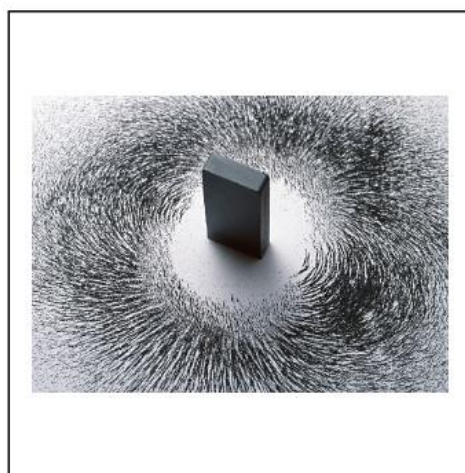

2 旋磁理疗保健



3 银离子面料杀菌

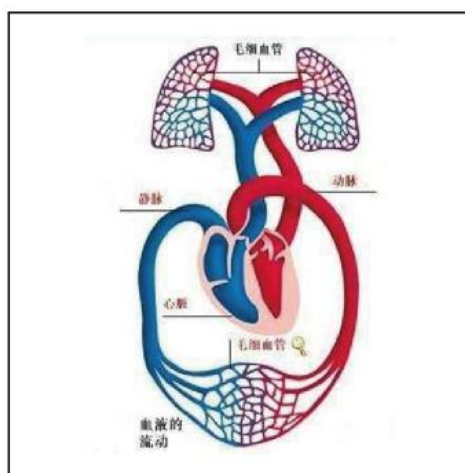

4 静磁保健作用



扫码下载莱特妮丝旋磁APP

400-880-5885